

まずは酵素を選択、酵素に浸漬してから、

ダイレクション・ソニックストレス専用

洗浄 ソニック 酵素

治療で使用したインスツルメントにほとんど触れることなくシステム洗浄サイクルによってオートクレーブの流れまで行えます。

酵素のパワーがしっかりしておりますので、すすぎで洗い残しが出やすいミラーなどはガーゼやスポンジでやさしく水洗いを行う。



* HBS抗原に高い不活化効果がある血液、たん白分解酵素の配合によって治療に使用した外科用器具に付着した血液、たん白や脂肪を強力に分解し高い清掃効果が得られます。

* イオン系界面活性剤により汚れの再付着を防止します。


* 強力な防錆剤を配合し外科用器具類の錆を抑えます。



* 酵素液の交換のタイミングは使用頻度によって色(青色~黄色)の変化で劣化を目で確認、判断でき、解りやすく、効果の有効を心配せず安心してご使用できます。洗浄器具によって色の変化が起こらない場合は7日間で酵素液は交換してください。



各ユニットのアルコールに付けたシャレーから集めたパー類

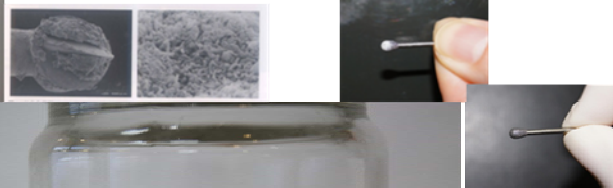

EXV-N3で超音波洗浄5分間行った後の様子
汚れの付着が再認識されました



洗浄ソニック酵素は液の交換時期を色の変化で確認できます。
青色から黄色に変化したら交換 青 → 黄 変化の無い場合は7日間で交換

洗浄ソニック酵素2倍希釈液にパー・リーマ類を浸漬してEXV超音波洗浄してください。
錆び抑制、汚れの再付着抑制、洗浄、HBS不活化の相乗効果が得られます。