

セメントやレジンが取れずにインスツルメントに固着した汚れを出来る限りきれいに洗浄する方法

注意事項

洗浄器の洗浄槽内の下底部に保護ホルダーがセットされていることを確認下さい。
この保護ホルダーはどのような時にも必ずセットされた状態で洗浄器はご使用いただきます。

☆セメントやレジンが取れずに有るインスツルメントを出来る限りきれいに洗浄する方法

- ①専用のステンレストレーを保護ホルダーの上に沈めます。
- ②セメントなどが付着しておりますインスツルメントを直接ステンレストレーの上に置きます。
- ③超音波洗浄を開始いたします。
- ④水中内の特殊形状発振体からの衝撃波を受けたステンレストレーからインスツルメントに直接洗浄パワーが伝わります。
- ⑤インスツルメントの細かな振動が汚れを剥離する力に変わります。これによって付着したセメントなどの汚れがきれいに落されていきます。
- ⑥取りきれない汚れも洗浄の回数を重ねていく間取れていきます。気がつくときインスツルメントがきれいになっております。

・インスツルメントにチタンコートなど特殊加工されている器材につきましてはコーティングが剥がれて来ることがございます。
ご注意ください。

3ヶの特殊形状発振体に器材が当たらないように保護ホルダーをセットされているか確認します。



次にステンレストレーを保護ホルダーの上に置いてスタンバイする。



ステンレストレーを保護ホルダーの上にセットした写真。



次に汚れたインスツルメントを直接トレーの上に置いて超音波洗浄機を作動させる。30分間行う。セメントなどが付着しているインスツルメントに対しての洗浄方法です。

